

ET SEE INFOLEHT SISALDAB OLULIST TOOTEKASUTUS- JA OHUTUSTEAVET TARBUATELE JA SILMAARSTIDELE. PALUN LUGEGE SEE HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE ALLES, ET SAAKSITE SEDA HILJEM UUESTI VAADATA. SOBIVAD KONTAKTLÄÄTSED PEAB ALATI MÄÄRAMA SILMAARST. KONTAKTLÄÄTSEDE KORREKTESEKS KASUTAMISEKS ON OLULINE JÄRGIDA SILMAARSTI JUHISEID JA KÕIKI TOOTEINSTRUKTSIOONE.

I. ÜLDINE TEAVE

TOOTE MARKEERING (nimi)

Stäälirised kontaktläätsed:

- AIR OPTIX™ NIGHT & DAY™ AQUA ja AIR OPTIX™ EX (lotrafilcon A) Soft Contact Lenses

TOOTE KIRJELDUS

Läätsesmaterjal sisaldab ligikaudu 24 % vett ja 76 % lotrafilcon A, fluorsilikonit sisaldav hüdrogeel, millega töödeldakse pinda. Läätsesmaterjalile on lisatud värvilisandit vaskfälotsüaniini, et saada helesinisest servast servani toonitud läätsed, mida on käsitsemise ajal kergem näha.

TEHNILISED ANDMED

Läätsed omadused

- Murdmisindeks (niisutatult): 1.43
- Valgusläbilaskvus: > 98 % (muutub koos tugevusega)
- Hapniku läbilaskvus (Dk): 140 x 10⁻¹¹ (cm²/sekundis) (ml O₂/ml x mm Hg), mõõdetuna temperatuuril 35°C (sisemine Dk-olukonmeetiline meetod)
- Veesisaldus: 24 % kaalu järgi füsioloogilises lahuses

Saadaolevate läätsede parameetrid

- Diameeter: 13,8 mm
- Baaskumerus: 8,4 mm; 8,6 mm
- Tugevused: Plano
- Minus: -0,25 D kuni -8,00 D (0,25 D intervallidega)
- -8,50 D kuni -10,00 D (0,50 D intervallidega)
- Pluss: +0,25 D kuni +6,00 D (0,25 D intervallidega)

SIHTOTSTARVE/KASUTAMINE

Kontaktläätsed toimivad murdmiskeskonnana, et suunata valguskiired võrkkestale korrigeerides nägemist.

SIHTRÜHMAD

Lotrafilcon A (sfäärilised) kontaktläätsed on mõeldud kandmiseks tervete silmadega 18-aastastele ja vanematele patsientidele, kes vajavad nägemise korrigeerimist (müopia või hüperopia), kellele need läätsed hästi sobivad ja kes on võimelised mõistma ja järgima läätsede kandmise, hoidmise ja ohutu kasutamise juhiseid (või kelle eest seda teeb hooldaja).

KLINIILINE KASU

Lotrafilcon A refraktiivse tugevusega kontaktläätsed parandavad nägemisteravust müopia ja/või hüperopiaiga patsientidel.

NÄIDUSTUSED (Kasutamine)

Lotrafilcon A (sfäärilised) kontaktläätsed on ette nähtud refraktiivse ametropia (müopia või hüperopia) optiliseks korrigeerimiseks heigusevabade silmadega isikute, kellel on minimaalne astigmatism, mis ei mõjuta nägemisteravust.

VASTUNÄIDUSTUSED (põhjused mittekasutamiseks)

- Nägemise korrigeerimiseks ei tohi lotrafilcon A kontaktläätsesid kanda teatud tervise- või keskkonnatingimuste puhul. Seisundid, mille korral kontaktläätsede kasutamine võib olla ohtlik või takistatud, on järgmised:
- Allergia, põletik, infektsioon või ärritus silmades, silmalauagudel või silma ümbruses
- Ebapiisav pisaravool (kuiv silm, mis häirib kontaktläätsede kandmist)
- Sarvkesta hüperteesia (sarvkesta tundlikkuse vähenemine)
- Mis tahes ravimite kasutamine, mis takistavad või on vastunäidustused kontaktläätsede kandmisele, sh silmaravimid
- Mis tahes süsteemne haigus, mis võib halvendada kontaktläätsede kandmisel või takistada nende kandmist
- Silma punetus või ärritus

Nende ja muude seisundite korral pidaage nõu silmaarstiga.

HOIATUSED

- Haavandilise keratiidi (tõsine silmainfektsioon) risk on osutunud läätsede pikendatud kandmisega kasutajate seas suuremaks kui läätsede ägapäevaste kasutajate seas.
- Tõsised silmaprobleemid, sh sarvkesta haavandid (haavandiline keratiit), võivad kiiresti edasi areneda ning viia nägemise kaotuseni.
- Kontaktläätsede kandmine suurendab silmainfektsioonide tekkemiski. Läätsede une ajaks silma jätmine või suitsutamise suurendab veelgi kontaktläätsede kandjatel esinevat haavandilise keratiidi riski.^{1,2}
- Objektivi kandjale tuleb selgitada, et kui tal tekib silmas ebamugavustunne, võrkkehane, liigne pisaravool, nägemise muutus, silma punetus või muud silmaprobleemid, tuleb kohe läätsed silmast ära võtta ning pöörduda viivitamatult oma silmaarsti poole.
- Probleemid kontaktläätsede ja läätsehooldusvahenditega võivad põhjustada tõsist silmakahjustust. Oluline on järgida silmaarstilt saadud juhiseid ja hoida pakendi märgistusel olevalid juhised läätsede ja läätsehooldusvahendite õigeks kasutamiseks
- Läätsede kontaktläätsed ei tohi ühtegi hooldusvahendit asendada mittesteriilsete vedelikega (nagu kraanivei, destilleeritud vesi, kodus valmistatud füsioloogiline soolalahus või sülg). Kraanivee ja destilleeritud vee kasutamist on seostatud *Acanthamoeba* poolt põhjustatud keratiidiga (sarvkesta infektsioon, mis ei allu ravile).

ETTEVAUTUSABINÕUD LÄÄTSEDE KANDMISEL JA KÄSITSEMISEL

- Kontrollige iga päev, kas silmad näevad terved välja, puudub ebamugavustunne ja nägemine on selge.
- Mitte kasutada, kui blisterpakend on rikutud või ei ole täiesti suletud. See võib põhjustada toote saastumist, mis võib viia tõsise silmainfektsiooni.
- Kui bistri fooliumkate on kogemata avatud enne kasutamist, tuleb läätsi hoida puhtas läätsekonteineris. Läätseseinustusevahendid pole kõik ühesugused, seetõttu järgige enne läätsede kandmist tootjapoolseid juhiseid selle hoidmiseks, puhastamiseks ja desinfitseerimiseks.
- Teie silmade tervise ja ohutuse säilitamise huvides peab läätsede kandmise ajaks määrama silmaarst. Kui silmaarst ei ole määranud pikemat kandmisgraafikut, ärge kandke (lotrafilcon A) kontaktläätsi magamise ajal.
- Ärge kunagi ületage ettenähtud kandmisgraafikut, hoolimata sellest, kui mugavalt läätsed tunduvad. See võib suurendada kõrvaltoime riski.
- Ärge andke läätsesid kellelegi teisele, sest sedasi võite levitada mikroorganism, mis põhjustavad tõsiseid silma terviseprobleeme.
- Mitte kunagi ei tohi lasta kontaktläätsed kokku puutuda mittesteriilsete vedelikega (sh kraanivei ja sülg), sest võimalik on mikroobne saastumine, mis võib viia püsiva silmakahjustuseni.
- Ärge kunagi kasutage läätsede desinfitseerimiseks vett, soolalahust või niisutavaid silmatilku. Need lahused ei desinfitseeri teie läätsesid. Soovitavada desinfitseerimislahuse mittekasutamine võib põhjustada raskest infektsiooni, nägemiskadu või pimedaks jäämist.
- Pidaage nõu silmaarstiga, enne kui otsustate kanda läätsesid sportimise ajal, sh ujumine ja muud veesportlaid. Kokkupuude veega (või teiste mittesteriilsete vedelikega) kontaktläätsede kandmisel selliste tegevuste ajal nagu ujumine, veesuusatamine ja muulviin, võib suurendada silmainfektsioonide, sh ka *Acanthamoeba* poolt põhjustatud keratiidi ohtu.
- Eemaldage ja hävitage läätsed, kui need on kokku puutunud toksilise või ärritava auruaga.
- Hävitage kontaktläätsed, mis on kuivanud või kahjustatud. Asendage need uute läätsedega.
- Kontaktläätsede kandjatel on soovitatav külastada oma silmaarsti vähemalt üks kord aastas või vastavalt juhistele.
- Teavitage tööandjat, et kannate kontaktläätsesid, eeskätt juhul kui peate töötamisel kasutama silmakaitsevahendeid.
- Jälgi iga silma õiget läätsede tugevust. Enne läätsede silma asetamist kontrollige, kas iga blisterpakendi läätsede tugevus on selle silma jaoks õige. Ärge muutke läätsede tüüpi või parameetreid enne silmaarstiga konsulteerimist.
- Kui läätsede kandmine on katkenud pikemaks ajaks, pidaage enne kandmise taaskasutamist nõu silmaarstiga.
- Olge ettevaatlik seebi, loojonide, kreemide, kosmeetikavodetede või deodorantide kasutamisel: nende sattumine läätsedele võib põhjustada ärritust.
- Pange läätsed silma enne meigi tegemist ning eemaldage enne meigi mahavõtmist.
- Kandke alati kaasas tagavaraläätsesid või tagavaraprilile.
- Ärge kasutage läätsesid pärast kõlblikkusaaja möödumist.

SOOVIMATUD KÕRVALTOIMED (võimalikud probleemid)

Kontaktläätsede kandmisel võib esineda probleeme, millest esmalt annavad märku üks või mitu järgmist nähtu ja sümptomit:

- Ebamugavustunne silmas [nagu midagi oleks silmas (võrkkehane); lääts põhjustab ebamugavust]
- Silma punetus
- Põletus-, torkimis-, sügelustunne või vesised silmad
- Ahmane nägemine (vähenenud nägemisteravus)
- Nägemishäired (valgustundlikkus (fotofobia), vikerkaarte või halode nägemine valgusallikate ümber)
- Ärritus (silma eristise hulga suurenemine)
- Ebamugavustunne või valu, sh peavalu
- Tunne, nagu silm oleks kuiv (raske või püsiv kuivsilmsus)
- Põletik
- Peapõõritus

Need nähtud ja sümptomid võivad olla seotud mitmete seisundidega, sh:

- Nägemise halvenemine (ajutine või püsiv)
- Sarvkesta abrasioon
- Sarvkesta ödeem (turse)
- Mikroobne infektsioon
- Haavandiline keratiit (sarvkesta haavand)
- Allergiline reaktsioon/ülitundlikkus
- Toksiline reaktsioon
- Sarvkesta vaskularisatsioon (sarvkesta veresoened)
- Sarvkesta infiltraadid (sarvkesta põletikulised rakud)
- Subkonjunktivaalne veritus
- Diploopia (kahekordne nägemine)

Nende nähtude, sümptomite ja seisundite ignoreerimisel võivad tekkida tõsisemad komplikatsioonid.

MIDA TEHA PROBLEEMIDE KORRAL

Kui tekib mõni eespool mainitud soovimatutest kõrvaltoimetest, eemaldage kohe lääts(ed).

- Kui nähtud või sümptomid taanduvad, siis vaadake hoolikalt lääts(es)i.
 - Kui nähtud on mis tahes viisi rikutud, ärge pange seda silma tagasi. Asendage see uue läätsesiga või pidaage nõu oma silmaarstiga.
 - Kui läätsel on mustus, ripsmekarv või võõrkeha või kui probleem laheneb ja lääts tundub olevat rikkumata, tuleb lääts enne silma tagasi panemist hoolikalt puhastada, loputada ja desinfitseerida.
 - Kui soovimatud kõrvaltoimed püsivad ka pärast läätsede eemaldamist või tekivad taas läätsede silma paneku, võtke lääts kohe silmast ära ja seeläbi pöörduge viivitamatult oma silmaarsti poole.
- Teil võib olla tõsine seisund, nagu infektsioon, sarvkesta haavand (haavandiline keratiit) või iriit. Need seisundid võivad kiiresti halvendada ja viia püsiva nägemise kaotuseni. Vähenemiseid reaktsioone, nagu marrastused, eptiili värvimine ja bakteriaalne konjunktiviit, tuleb ravida varakult, et ära hoida komplikatsioone.
- Ajuti tekkiva kuivuse leevendamiseks pilgutage mitu korda silmi või kasutage kontaktläätsesid niisutavaid silmatilku, mis on ette nähtud kasutamiseks koos pehmetele kontaktläätsedega. Kuivuse püsimisel pidaage nõu oma silmaarstiga.

- Kui lääts jääb kinni (ei liigu enam), tilgutage silma mõned tilgad kontaktläätsi niisutavat lahust ja oodake, kuni lääts hakkab silmas vabalt liikuma. Probleemi püsimisel pidaage nõu oma silmaarstiga.
- Kui lääts nihub silma keskelt ära, võib selle õigesse kohta tagasivõimiseks proovida järgmist:
 - Sulgege silmalaua ja masseerige lääts ettevaatlikult oma kohale tagasi või
 - Vaadake lääts suunas ja pigutage ettevaatlikult silma või
 - Püüdke paigast nihkunud lääts tagasi sarvkestale nihutada, vajutades sõrmega kergelt ülemise või alumise silmalaua servale.
- Kui lääts purnub silmas, eemaldage ettevaatlikult tüki, haarates need ettevaatlikult sõrmede vahele samamoodi nagu terve lääts eemaldamisel. Kui läätsedukid ei eemaldu kergelt, ärge pigistage silma kudesid. Loputage silma steriilse füsioloogilise soolalahusega ja püüdke uuesti tüki tähta teha. Kui sellest ei piisa, pöörduge abi saamiseks oma silmaarsti poole.

Lisateavet selle kohta, **MIDA TEHA**, kui terapeutilise kasutamise ajal **TEKIB PROBLEEM**, leiate lõigust **II. TÄIENDAV TEAVE LÄÄTSE TERAPEUTILISE KANDMISE KOHTA**.

Üldised esmaabijuhised:

- Kui mis tahes kemikaalide (majapidamiskeemia, aiataimede hoolduslahused, laboratoorsed kemikaalid jne) satuvad silma:
- Loputage silmi kohealt füsioloogilise lahuse või kraaniveega.
- Eemaldage silmast läätsed ja hävitage need ning võtke viivitamatult ühendust silmaarstiga või minge lähimasse erakorralise meditsiini osakonda.

TOISTEST KÕRVALTOIMETEST TEATAMINE

Kõikides toistestest kõrvaltoimetest, mis on seotud selle meditsiiniseadme kasutamisega, tuleb teavitada Alcon Laboratories Inc.:

EU - Pöörduge oma asukohariigi kohaliku esindusse või Alconi toodete edasimüüja poole

E-mail: qa.complaints@alcon.com

Koduleht: https://www.alcon.com/contact-us

Toistest juhtumistest tuleb teatada ka teie riigi meditsiiniseadmete pädevale asutusele.

KASUTUSJUHEND

Kuigi mõned õigusaktid lubavad kontaktläätsede hankimist ilma retseptita, peaks ohutuse huvides kontaktläätsi paigaldama ja neid hindama silmaarst.

KANDMIS- JA ASENDAMISGRAAFIK

Kandmis- ja asendamisgraafiku peaks määrama silmaarst, lähtudes patsiendi individuaalsetest vajadustest ja füsioloogilistest tingimustest. Läätsesid võib kasutada ägapäevaseks kandmiseks (alla 24 tunni päevas, ärkveloleku ajal) või pikemaajaliseks kandmiseks kuni 30 ööd pidevalt kandmiseks, eemaldades need ülitseerimiseks või puhastamiseks ja desinfitseerimiseks enne uuesti paigaldamist, nagu silmaarst soovib. Kõigil ei õnnestu läätsi magamise ajal või maksimaalselt 30 pidevat ööd kanda.

Kasutajad, keda silmaarst ei ole ohutu kandmise ajaks kindlaksmääramiseks hinnanud, ei tohiks läätsi magamise ajal kanda.

Läätsed tuleks ära võtta ja asendada uue paariga iga kuu või sagedamini, kui silmaarst seda soovib. Pikemaid asendusperioode pole uuritud ja need ei ole soovitatavad.

JUHISED LÄÄTSE KÄSITSEMISEKS

- Iga kord enne kontaktläätsede käsitsemist peske ja loputage käed hoolikalt ning kuivatage korralikult puhta tolmuvaba rätikuga.
- Raputage kergelt blisterpakendit (mis sisaldab uut lääts) enne avamist.
- Eemaldage lääts blisterpakendist (või läätsekonteinerist, kui tegemist on varem kasutatud läätsesga), kallutades selle ettevaatlikult oma peopesa.
- Veenduge, et lääts õige külg on üleval pool ja teil on kummagi silma jaoks õige lääts.
- Kontrollige läätsede välimust enne silma panemist.
- Ärge pange kahjustatud või määrdunud lääts silma.

JUHISED LÄÄTSE SILMA PANEKUKS

- Enne kontaktläätsede käsitsemist peske ja loputage käed hoolikalt ning kuivatage korralikult puhta tolmuvaba rätikuga.
- Seadke lääts oma parema või vasaku kae puhta nimetissõrme otsale. Asetage sama käe keskmine sõrm alumiste ripsmete piirile ning tõmmake alumine silmalaua alla.
- Teise käe sõrmedega tõmmake üles ülemine silmalaua.
- Pange lääts otse silma (sarvkestale) ja pöörake sõrm ettevaatlikult lääts pealt maha.
- Vaadake allapoole ja vabastage aeglaselt alumine laug.
- Vaadake otse ette ja vabastage aeglaselt ülemine laug.
- Pilgutage kergelt silma.
- JUHISED LÄÄTSE SILMAST EEMALDAMISEKS
- Peske ja loputage hoolikalt käed ning kuivatage korralikult puhta tolmuvaba rätikuga.
- Pilgutage silmi mitu korda.
- Vaadates üles libistage lääts sõrmeotsaga allapoole, silma valge osa peale.
- Eemaldage lääts, haarates selle ettevaatlikult põidia ja nimetissõrme vahele. Ärge pigistage silma kudesid.
- Kui lääts eemaldamine on raskestatud, tilgutage silma libestavaid ja niisutavaid tilkaid ning proovige mõne minuti pärast taas lääts eemaldada.
- Läätsede eemaldamiseks läätsekonteinerist või silmast ei tohi kunagi kasutada pintsette, iminappasid, teravaid esemeid ega sõrmekeüsi.

Kui teil esineb probleeme läätsede eemaldamisel (lääts on paigast nihkunud või rikutud), vt **MIDA TEHA PROBLEEMIDE KORRAL** eespool.

ÜLDISED JUHISED LÄÄTSEDE HOOLDUSEKS

Asendamine

- Iga kord, kui lääts eemaldate eemaldage silmast enne plaanijärgset läätsede asendamise aega, tuleb enne järgmist kasutamist korralikult puhastada, loputada ja desinfitseerida.
 - Silmaarst peab soovitava sobivat läätsehooldussüsteemi ja andma juhised selle kasutamiseks. Ärge vahetage läätsehooldussüsteemi ilma silmaarstiga konsulteerimata.
 - Läätseseinustustoodetel on erinevad kasutamisiisid ja juhised. Et vältida silmaprobleeme või läätsede rikkumist, lugege alati ja järgige hoolikalt kasutavate(t) toot(j)e tootjapoolseid juhiseid.
 - Mõned läätsehooldustooted näevad ette läätsede hõõrumise ja loputamise etapi. Sel juhul järgige läätsehooldust tootja juhiseid lahuse koguse ja hõõrumise ning loputamise aegade kohta, et vähendada tõsiste silmainfektsioonide riski.
- Läätsede leotamine ja säilitamine:
 - Kasutage ainult värskest läätsehoolduslahust iga kord kui te leotate (hoiustate) oma läätsesid.
 - See, kui kaua saate läätsi hoida enne puhastamist, loputamist ja korratavatest desinfitseerimise etappidest, sõltub kasutatavatest läätsehooldustoodetest. Järgige tootja juhiseid.
 - Ärge korduvkasutage vana lahust, mis on jäänud alles läätsekarpi, ega valage sinna lahust juurde, sest lahuse korduvkasutamine vähendab läätsede desinfitseerimise efektiivsust ja võib viia tõsise infektsiooni, nägemise kaotuse või pimedaks jäämiseni. Lahuse juurdevahetamine ei ole peetud silmas värske lahuse lisamist infektsiooni, mis on läätsed karpi jäänud eelmisest korral.
- Pärast läätsehooldusvahendite avamist visake järelejäänud lahuse pärast toote tootja soovitatud perioodi lõpu ära.
- Ärge kasutage tooteid, mis on mõeldud ainult kõvade või jäikade gaasi läbilaskvate läätsede jaoks.
- Ärge kunagi kasutage koos läätsehoolduslahustega või läätsede desinfitseerimiseks kuumust.
- Ärge kunagi kasutage läätsede desinfitseerimiseks vett, soolalahust ega niisutustilku. Need lahused ei desinfitseeri teie läätsi. Soovitavada desinfitseerimislahuse mittekasutamine võib põhjustada raskest infektsiooni, nägemiskahjustust või pimedaks jäämist.

Äravisamine

- Läätseseinustuse ei ole näidustatud, kuna läätsed visatakse pärast silmast eemaldamist minema.

- Läätsed tuleks puhastada, loputada ja desinfitseerida ainult hädaolukorras, kui asendusläätsi pole saadaval.

LÄÄTSEHOOLDUSLAHUSED

Lotrafilcon A kontaktläätsede hoolduseks võib kasutada läätsehoolduslahuseid, mis on vastavalt näidustatud kasutamiseks koos silikonihüdrogeelilist pehme kontaktläätsedega. Järgige silmaarsti soovitatud läätsehooldusvahendite tootjapoolseid juhiseid. On tõestatud, et lotrafilcon A kontaktläätsed sobivad järgmistele lahustele:

- AOEPT™ PLUS with HydraGlyde™ Cleaning and Disinfecting Solution
- OPTI-FREE™ PureMoist™ Multi-Purpose Disinfecting Solution

LÄÄTSEKONTEINERID ÜLDISED JUHISED

- Kontaktläätsede hoolduslahused ja kontaktläätseseinustid on erinevad, neil on erinevad kasutuseesmärgid ja kasutusjuhendid. Mõned konteinerid on ette nähtud üksnes kontaktläätsede säilitamiseks, teised on spetsiaalselt sisseehitatud neutraliseeriva plaadiga kasutamiseks koos vesinikperoksiidiga puhastus- ja desinfitseerimisüsteemidega. Läätsesid, mida ei kanta ägapäevaseid, saab pärast puhastamist ja desinfitseerimist säilitada kinnises konteineris aja jooksul, mis sõltub kasutatavast läätsekonteinerist ja kontaktläätselahusest. **Järgige alati kasutavate läätsehooldusvahendite tootjapoolseid juhiseid.**
- Silmaarst peaks soovitava ja andma juhiseid sobivate läätsehooldusvahenduste ja läätsekonteineri kasutamiseks.
- Kontaktläätseseinustid on bakteritele soodsaks kasvukeskkonnaks. Neid tuleb õigesti puhastada, kuivatada ja välja vahetada, et vältida läätsede saastumist või rikkumist.
 - Puhastage kontaktläätseseinustid sobiva kontaktläätselahusega ja kuivatage vastavalt konteineri juhendile. Kuivatamisjuhend võib olla erinev sõltuvalt kasutatavast läätsekonteinerist, nt õhu käite kuivama järele või kuivatamine tolmuvaba lagga.
 - Asendage läätsekonteinerid uulaga vähemalt üks kord iga 3 kuu järel või vastavalt läätsekonteineri tootja soovitusel.
 - Asendage spetsiaalselt sisseehitatud neutraliseeriva diski läätsekonteinerist vastavalt tootja juhendile või sagedamini, kui puhastatud ja desinfitseeritud läätsed põhjustavad silma sisetamisel põletus- ja torkimistunnet.
 - Ärge kasutage läätsede säilitamiseks ega läätsekonteineri loputamiseks vett või mis tahes mittesteriilset lahust. Kasutage üksnes värskest läätsehoolduslahust, et vältida läätsede või läätsekonteineri saastumist. Mittesteriilsete lahuste kasutamine võib viia raskete infektsioonide, nägemiskahjustuse või pimedaks jäämiseni.

HÄVITAMINE JA TAASKASUTUS

Visake kontaktläätsed ja blisterpakend prügikasti, mitte valamusse ega tualetipotti. Pappkarbi ja bistri polüpropüleenist (PP) plastikkorpuse võib panna prügikasti või suunata taaskasutusse vastavalt kohalikele jäätmekäitluse eeskirjadele.

PAKENDI SISÜ (Kuidas tastaakuse)

Iga lotrafilcon A lääts on fooliumkattetega plastbistris, mis sisaldab isotoonilist fosfaadiga puhverdatud soolalahust (PBS) koos 1 % kopolümeeri 845G (0.2% VP/DMAEMA Copolymer) ja on steriliseeritud auruga.

Pakendile on märgitud läätsede parameetrid, sh baaskumerus, diameeter ja dioptriiline tugevus, ega samuti ka tootjapoolne parti number, tootmiskupaev ja kõlblikusaeg. Pakendi sildi võib olla märgitud ka tootekood: LFA140.

Läätsed on pakendatud steriilsetesse pappkarpidesse, mis sisaldavad kuni 6 eraldi suletud kontaktläätsi.

II. TÄIENDAV TEAVE LÄÄTSE TERAPEUTILISE KANDMISE KOHTA

Terapeutilise kasutamise korral on vajalik silmaarsti hoolikas järelevalve. Lisateavet selle kohta, kuidas see mõjutab sihtkasutajat, sihtotstarvet/kasutust, patsientide sihtühmi, kliinilisi eelseid, näidustusi, vastunäidustusi, hoiatusi, ettevaatusabinõusid, mida teha probleemi ilmnemisel, ja kasutusjuhiseid, vt joonist **III. TÄIENDAV TEAVE SILMAARSTIDELE**.

OLULISED ETTEVAUTUSABINÕUD

- Oluline on hoolikalt järgida oma silmaarsti juhiseid teie seisundi ja terapeutiliste läätsede kasutamise kohta. Nii enne ravi kui ka ravi ajal arutage kõiki küsimusi või muresid, mis teil võivad tekkida.
- Teie nägemine võib kontaktläätsede ravi ajal olla kahjustatud. See võib nõuda täiendavaid prille nägemise korrigeerimiseks ja piiranguid ägapäevaste tegevustele, nagu autotjuhtimine.

Järelekontroll

- Terapeutiliste läätsede kandjad vajavad hoolikat professionaalset järelevalvet ja jälgimist. Järelekontrollid on vajalikud teie paranemise ja teie silmade jätkuva tervise tagamiseks. Teie silmaarst peab andma teile juhiseid ja järelekontrolli ajakava.

Ravimid

- Raviks vajalikke ravimeid tuleb kasutada ettevaatusega ja silmaarsti hoolika järelevalve all.

Käsitsemine ja kandmine

- Kokkupuude veeга võib ajutiselt mõjutada läätse sobivust ja põhjustada tõsist silmapõletikku. Vannis või duši all käies ärge laske veel silma sattuda. Terapeutiliste kontaktläätsede kandmise ajal lõpetage veeteguvused, nagu ujumine või mulivanni kasutamine.
- Silmasid tervise säilitamiseks peab läats silmal vabalt liikuma. Kui läats kleepub (lõpetab silma peal liikumise), võite ühendust oma silmaarstiga. Kui teid juhendatakse niimoodi tegema, tilgutage mitu tilka soovitatud libestavat lahust ja oodake, kuni läats hakkab vabalt liikuma.
- Enne silmaarsti kabinetist lahkumist peate saama juhised läätse paigaldamise ja eemaldamise kohta.
- Mõnel juhul paigaldab või eemaldab läatsi ainult silmaarst.
- Kui teie silmaarst käsib teil läätse eemaldada, peate enne kabinetist lahkumist näitama, et suudate läätsest kiiresti eemaldada või lasta kellegil teisel teie eest läätse eemaldada. Silmaarst peaks teile ka andma nõu, kui sageli läatsi eemaldada ja/või uut läätse silma panna.

VÕIMALIKUD PROBLEEMID JA MIDA TEHA

Terapeutilise kasutamise ajal võib soovimatu kõrvaltoime olla tingitud kaasuvast haigusest või seisundist või kontaktläätsede kandmisest sidemena. Kui juba haige või kahjustatud silma raviks kasutatakse pehmet kontaktläätsed, võib olemasolev haigus või seisund, mida ravitakse, süveneda. Silmaprobleemid võivad kiiresti areneda ja põhjustada nägemise kaotust.

Ligine pisaravool või fotofobia (valgustundlikkus), ebavaline eritis silmadest või tugev valu ei ole normaalsed. Kui mõni neist peaks ilmnema või kui teie seisund muutub viisil halveneb, võite viivitamatult ühendust silmaarstiga. Teid tuleks uurida, et selgitada välja põhjus ja mida teha.

III. TÄIENDAV TEAVE SILMAARSTIDELE

A. MITTE-TERAPEUTILINE KASUTAMINE

Vaadake ülaltoodud jaotises I **ÜLDINE TEAVE** toodud teavet.

B. TERAPEUTILINE KASUTAMINE

LÕPP- KASUTAJA

Lõppkasutaja A kontaktläätsed on mõeldud kasutamiseks ainult koolitatud spetsialistide (silmaarstid ja optometristid) poolt.

SIHTOTSTARVEKASUTAMINE

Ravieesmärgidel kandmisel pakuvad lotraficon A kontaktläätsed füüsilist barjääri sarvesta kaitsmiseks.

PATSIENTIDE SIHTRÜHMAD

Terapeutilise kasutamise korral, nagu silmaarst on määranud, võib kavandatud kandjate populatsiooni hõlmata sarvestakahjustusega 18-aastaseid ja vanemaid isikuid, kes võivad, aga ei pruugi paranemise ajal vajada nägemise korrigeerimist.

KLINILINE KASU

Terapeutilistel eesmärgidel kandmisel tekitavad lotraficon A pehmed kontaktläätsed füüsilise barjääri kahjustatud sarvesta kaitsmiseks, leevendavad valu ja võimaldavad sarvestalt paraneda.

NÄIDUSTUSED (kasutamine)

Lisaks tervete silmade nägemise korrigeerimisele on lotraficon A kontaktläätsed näidustatud ka terapeutiliseks kasutamiseks. Läätsi saab kasutada nõ sidemena sarvesta kaitsmiseks ja sarvesta valu leevendamiseks sarvesta kahjustusega patsientide ravimisel.

VASTUNÄIDUSTUSED (põhjused mittekasutamiseks)

Terapeutilistel eesmärkidel ei tohi lotraficon A kontaktläätsi kasutada teatud tervise- või keskkonnatingimuste puhul, mille on määranud silmaarst. Nendeks on:

- Aktiivne infektsioon silma või silmalaugude sees või nende ümbruses
- Ebapiisav pisarakile (kuiv silm), mis häirib kontaktläätsede kandmist
- Sarvesta hüpoesteesia (sarvesta vähenenud tundlikkus)
- Silma tahes süsteemsete või paiksete ravimite kasutamine, mis häirivad läätse terapeutilist kasutamist, sealhulgas silmaravimid
- Kõik süsteemsed haigused, mis võivad süveneda või häirida kontaktläätsede ohutut kandmist

HOIATUSED

- Lotraficon A kontaktläätsede terapeutiliseks kasutamiseks on vajalik professionaalne hoolikas järevalve.

- Olge ettevaatlik, eriti kui ravivatek hõlmab ka ravimite kasutamist.

MIDA TEHA PROBLEEMIDE KORRAL

- Terapeutilise kasutamise ajal võib kõrvaltoime olla põhjustatud algsest haigusest või vigastusest või kontaktläätsede kandmisest tagajärgedest. On olemas võimalus, et olemasolev haigus või seisund võib halveneda, kui terapeutiliseks kasutamiseks mõeldud pehmet kontaktläätsed kasutatakse juba haige või kahjustatud silma raviks.
- Kui probleemi ilmnevad või süvenevad, peab kandja pöörduma kohe silmaarsti poole ja järgima antud juhiseid.

KASUTUSJUHEND

KANDMIS- JA ASENDAMISGRAAFIK

Terapeutilise kasutamise korral peab kandmisgraafiku määrama silmaarst. Kontaktläätsi võib kanda pidevalt kuni 30 ööd või lühemat aega, kaasa arvatud ööpäevane kandmine (alla 24 tunni ööpäeva, ärkveloleku ajal), eemaldades need üliseerimiseks või puhastamiseks ja desinfitseerimiseks enne uuesti paigaldamist vastavalt silmaarsti antud juhistele.

Silmaarst peaks andma läätse paigaldamise ja eemaldamise kohta konkreetsed juhised, mis põhinevad professionaalsel hinnangul ja olemasoleval kogemusel, mis on seotud konkreetse ravitava seisundiga. Läätsed tuleks ära visata ja asendada uue paariga iga kuu või sagedamini, kui silmaarst seda soovib.

C. ERIHOIATUSED SILMAARSTILE

- Sobiva disaini ja omaduste läätse valimisel peab silmaarst arvestama läätse kõigi omadustega, mis võivad mõjutada läätse töomoodusi ja silma tervist, sh hapniku läbilaskvus, läätse tsentralsed ja perifeerne paksum ja optilise tsooni läbimõõt.
- Sobitamiseks ja diagnostilisel eesmärgil kasutatavad katseläätseid tuleb pärast ühekordset kasutamist ära visata ja neid ei tohi korduvkasutada järgmistel patsientidel.
- Läätsi määrav silmaarst peab esmase määramise ajal hoolikalt hindama silma tervist ja läätse töomoodusi silmas ning edaspidi jätkama regulaarset jälgimist.
- Koolest pigmenti fluoresteini ei tohi kasutada, kui läätسد on silmas. Pigment suurendab läätse sisse ning selle värvus muutub.
- Diabeetikutele võib sarvesta tundlikkus olla vähenenud ning seetõttu on neil suurem oht sarvesta kahjustuste tekkimise, kui ei parane sama kiiresti või nii täielikult kui inimestel, kellel suhkurtõbe ei ole.
- Raseduse ajal või suukaudsete rasestumisvastaste pillide kasutamisel võib esineda muutusi nägemises või läätsede talutavuses. Patsiente tuleb vajadusel sellest teavitada.
- Visuaalsed muutused või muutused läätse talutavuses võivad tekkida raseduse, rinnaga toitmise või suukaudsete rasestumisvastaste vahendite kasutamisel. Neid patsiente tuleb hoolikalt jälgida nägemise, mugavuse või muude silmamutuste suhtes. Silmaarst peab patsienti juhendama, et silma punetuse või ärrituse tekkinisel tuleb läätse kohe silmast ära võtta.
- Enne silmaarsti kabinetist lahkumist peab patsient oskama kontaktläätsesid kohe silmast ära võtta või peab tal olema abiline, kes saab seda teha tema eest.
- Vajalikul on rutinsed silmakontrollid, mille abil saab jätkuvalt kinnitada patsiendi silmade tervist.
- Ajal soovivat patsientidel külastada silmaarsti vähemalt üks kord aastas või sagedamini, vastavalt silmaarsti soovitusel.
- Patsiente tuleb läätsede pideva kandmise esimese kuu jooksul hoolikalt jälgida, kuna see vaatlusperiood võib ennustada patsiendi võimaliku läätsekandmise edukust. Need, kellel on varases faasis põlvkõltselise reaktsiooni, ei pruugi olla sobivad kandidaadid pidevaks kandmiseks.
- Terapeutilisel kasutamisel paigaldab ja eemaldab teatud juhtudel läatsi ainult silmaarst ja sellisel juhul tuleb patsiente juhendada, et nad ise läatsi EI käsitseks.

D. PAIGLADAMISJUHISED

Lotraficon A pehme kontaktläätsede paigaldamine on lihtne ja etteaimatav, kuna kehtivad tavapärased kontaktläätsede paigaldamise meetodid. Patsiendi omadused, mis on vajalikud lotraficon A pehmete kontaktläätsede kasutamisel edu saavutamiseks, on sarnased teiste sfääriliste pehmete kontaktläätsede kandjate omadega. Enne paigaldamist tuleb läbi viia põhjalik uuring, veendumaks, et patsient sobib pehme kontaktläätsede kandmiseks. Kui kaalute lotraficon A kontaktläätsede kasutamist *mitte*terapeutiliseks kasutamiseks, peaks nende paigaldamine pirduma terve silmaga inimestele (vt ülalpool **Näidustused (kasutamine)** lõigus I. **Üldine teave**).

Paigaldamiseelne kontroll on vajalik, et:

- Hinnata patsiendi:
 - Motivatsioon
 - füüsilist seisundit (üldine tervis)
 - o oskust mõista kontaktläätsede kandmisega kaasnevaid riske ja eeliseid
 - suutlikkust ja valmisolekut järgida hooldus- ja kandmisgraafikuid puudutavaid juhiseid
- Sooritage silmamõõtmised kontaktläätsede parameetrite esialgseks valimiseks
- Koguge kliinilist algteavet, millega saab võrrelda paigaldamisejärgseid uuringutulemusi

Paigaldamiseelne kontroll peaks sisaldama:

- põhjalikku haiguslugu
- sfäärilist/silindrilist refraktsiooni.
- Keratomeetria
- pisarate hindamist
- biomikroskoopiat

Katseläätse hindamine

Läätsede baaskumeruse valik

- Esiagne läätsevalik peaks olema 8,6 baaskumerus. Hinnake sobivust, et näha, kas see vastab hästiistuva läätse omadustele (vt ülalpool Läätsede sobivuse hindamine). Kui läätсел on hinnanguliselt tiheda (kumera) sobivuse omadused, paigaldage suurema baaskumerusega läats. Kui läätсел on hinnanguliselt lõdva (lameda) sobivuse omadused, proovige 8,4 baaskumerust. Kui kumbi baaskumerus ei vasta hästiistuva läätse omadustele, paigaldage teist marki läats.

Esiagne läätse tugevuse valik

- Esiagne tugevuse valik peaks olema võimalikult lähedane patsiendi refraktsioonitugevusele, võttes vajadusel arvesse sfäärilise ekvivalendi ja tipu arvutusi.

Läätsede sobivuse hindamine

- Laske läätsele umbes 15 minutit silmas olla. See annab patsiendile aega läätsedega kohanemiseks ja läätsedele aega silmas kohandamiseks.
- Hinnake läätsede sobivust ja liikumist silmas. Sobivuse hindamisel on abiks järgmised juhised:
 - Hästi paigaldatud läätse omadused
 - Hästi paigaldatud lotraficon A kontaktläätsed vastavad järgmistele kriteeriumidele:
 - Hea tsentreerimine ja sarvesta täielik katvus kõikides vaateväljades.
 - Pisav läätse liikumine, et võimaldada primaarse või ülespool suunatud pilgu pilgutamise ajal läätse all pisaravahetust.
 - Rahuldav **push-up test**
 - Kui patsient vaatab otse ette, asetage oma nimetissõrm patsiendi alumisele silmalaule ja lükake läätse serva ülespoole, jälgides samal ajal biomikroskoobiaga läätse liikumist. Seejärel tõmmake laug alla ja jälgige läätse tagasilülekut.
 - Hästi paigaldatud läats liigub vahel ülespoole, peatudes varsti pärast libumest moodustumist ja naaseb seejärel vabalt oma algasendisse.
 - Hea mugavus ja stabiilne visuaalne reaktsioon (sfäärilise refraktsiooniga).
 - Tiheda (kumera) läätse sobivuse omadused
 - Tihedalt või kumeralt liituvat läätse ei tohi väljastada. Kui läätse sobivust peetakse liiga kumeraks, tuleks võimaluse korral hinnata lamedamat läätse (suurem baaskumerus). Tihedalt või kumeralt istuvat läätсел on mõned või kõik järgmised omadused:
 - Pilgutamise ajal esmase või ülespoole suunatud pilguaga on läätse liikumine ebapiisav või puudub.
 - Võib esineda sidekestal paiknev kompressiooni ring (süvakudedes).
 - Mitterahuldav **push-up test**
 - Tihedalt liitub läats ei liigu. Kui läats on edukalt üles lükatud, võib see jääda tsentrist välja või naasta aeglaselt oma algasendisse.
 - Hea tsentreeritus.

- Hea mugavus.
- Nägemise kõikumine pilgutuste vahel.
 - Lõdva (lameda) läätse omadused
 - Läätsede sobivust peetakse liiga lõdvaks, tuleks võimaluse korral hinnata tihedamat läätse (väiksemat baaskumerust).
 - Lõdvalt istuvat läätсел on mõned või kõik järgmised omadused:
 - Läätsede serva eraldumine. Isegi väike serva tõus viitab lõdvalt istuvale läätsele.
 - Vähenenud mugavus. See leid on sageli ainus signaal, et läats istub lõdvalt. Kui esialgne mugavus kiiresti ei parane, proovige võimalusel väiksemat baaskumerust.
 - Läätsede liigne liikumine pilgutamise ajal esmasel või ülespool suunatud pilguaga.
 - Lõdvalt istuv läats liigub väga kergesti, tunduvalt kaugemale libumise ja võib-olla tungib pupillile või ulatub sellest kaugemale.
 - Seejärel naaseb see väga kiiresti oma algasendisse ja sageli algsest positsioonist madalamale.
 - Kehv tsentreerimine koos libaalse kokkupuutega silmade liigikumise korral.
 - Pärast pilgutamist võib nägemine olla hägune.

Üldised paigaldamisnõuanded

- Vaadake üle kontaktläätsede hooldust, ettevaatusabinõud ja vastunäidustused ning hinnake nii patsiendi silmade kui ka üldist tervist. Pärast terviseuueisundi kinnitamist arutage patsiendi nägemisvajadusi, et määrata kindlaks esialgne kandmise ajakava, maksimaalselt kuni 30 järjestikust ööd.
- Normaalsed terved silmad ja hea üldine tervistlik seisund on mõlemad vajalikud, et kaaluda maksimaalse 30 järjestikuse öö kandmise ajakava.
- Hinnake olemasolevat sarvesta (nt vaskularisatsioon, armistumine, düstrofia), sidekesta (nt pingekula, follikulid, papillid), silmalaugude (nt Meibomi näärmete düsfunktsioon, blefariit) ja/või üldist tervistlikku seisundit, et aidata määrata esialgset kandmisgraafikut.
- Tungivat soovitatakse individuaalselt proovisobitamist silma.
- Hästi paigaldatud läats liigub silmas 0,1–0,5 mm.
- Lotraficon A läätsede pikaajalise kandmise hindamisel on oluline hinnata läätsede sobivust piisavaks liikumiseks erinevatel ajahetkedel pärast seda, kui patsient läätsede kandmise ajal magab. Need hinnangud peaksid hõlmama järelkontrolli niipea kui võimalik pärast patsiendi unest ärkamist, samuti muli kellaajal. Kui sobivust peetakse liiga tihedaks või kumeraks, tuleb patsiendile uuesti paigaldada läats, mis vastab hästiistuva läätse kriteeriumidele.
- Ni esialgse paigaldamise kui ka järelkontrollide ajal peaks läätse sobivuse hindamine hõlmama tavapäraste ohutus- ja tõhususstandardite hindamist:
 - nägemisteravus [sealhulgas sellised probleemid nagu nägemise kõikumine ja fotofobia (valgustundlikkus)]
 - läätsede mugavus
 - läätsede ladestused
 - bulbaarne ja tarsaalne konjunktivi (põletik ja punetus)
 - silmalaud (blefariit, Meibomi näärme funktsioon)
 - sarvest [pisarakile maht ja kvaliteet, tursed, vaskularisatsioon, keratiit (sh haavandiline) ja infiltraadid]

Ilmingud	Võimalikud põhjused
Vertikaalsed striad sarvesta tagapinnal	Liigne turse
Sarvesta neovaskularisatsioon	Liigne turse
Keratiit, limbaadne hüperemia	Tundlikkus läätsehooldustoodete suhtes; liigsed läätse ladestused; halvasti sobiv läats
Keratiit, infiltraadid, hüperemia	Mikroobne infektsioon; tundlikkus läätsehooldustoodete suhtes
Papillid ja/või follikulid, keratiit	Mikroobne infektsioon; liigsed läätse ladestused; kahjustatud või halvasti sobiv läats; hooajalised allergiad; tundlikkus läätsehooldustoodete suhtes

Kui leiaksite, et mis tahes nähud või sümptomid on seotud kontaktläätsede kandmisega ja neid ei saa muude parandusmeetmetega (nt läätsehooldustoodete vahetamine) parandada, kasutage lühemat kandmisgraafikut, lõpetage kandmine või paigaldage teist marki läätse. Nakusilku sarvesta haavandi ja muud mikroobse infektsiooni nõuavad kontaktläätsede kohest eemaldamist ja kohest ravi. Pärast lahenduse leidmist on tungivat soovitatav kandmisgraafikut lühendada, võimalik on pikemaajalise kandmise katkestamine. Kui mõne konkreetse vastituse osas esineb ebakindlust, konsulteerige kontaktläätsede kasutades padeva silmaarstiga.

Patsiendi valimine, ravi ja terapeutiliseks kasutamiseks sobitamine

Patsiendi valik

- Lotraficon A kontaktläätsede paigaldamine terapeutiliseks kasutamiseks peaks olema piiratud teatud mittenakkuslike haiguseisunditega isikutega (vt ülalpool Näidustused lõigus Terapeutiline kasutamine).
- Ärge kunagi paigaldage kontaktläätsi mikroobe infektsiooniga isikutele.

Patsiendi ravi

- Lotraficon A kontaktläätsede terapeutiliseks kasutamiseks on vajalik hoolikas professionaalne järevalve ja patsiendi ravisoostumus on selle programmi õnnestumise seisukohalt kriitilise tähtsusega. Mõnel juhul teostab läätsede paigaldamist ja eemaldamist ainult silmaarst. Rõhutada kandjale teie poolt määratud kandmise, kõrvaldamise ja järeelhoolduse ajakava järgimise tähtsust. Kui saate jälgimise käigus teada, et patsient ei pea kinni ettenähtud kandmis- ja asendusgraafikust, on soovitatav patsient programmist välja jätta. Patsienditõimikuid tuleb säilitada, et jälgida patsienti tavapärast jälgimisgraafikut.
- Patsiente, kellele on paigaldatud terapeutiliseks kasutamiseks mõeldud lotraficon A läätseid, tuleb hoolikalt jälgida ja juhendada läätse riskide, kasu ja õige kasutamise osas. Silmaarst peaks patsiendiga arutama võimalust, et olemasolev haigus või seisund võib halveneda, kui pehmet kontaktläätsed kasutatakse terapeutilisel eesmärgil juba haige või kahjustatud silma raviks. Kuna sellisel juhtudel võib sarvest olla juba kahjustatud, tuleb sarvesta hoolikalt uurida ja seda pidevalt jälgida, et läats ei takistaks paranemisprotsessi.

Paigaldamine

Järgige sfääriliste läätsede paigaldamise kohta kehtivaid üldisi juhiseid ja võtke arvesse seda olulist lisateavet:

- Terapeutilisel sobivuseesmärgide puhul hinnatakse sobivust patsiendi mugavuse, läätse liikumise ja läätse võime järgi sarvestale tsentreeruda.
- Terapeutilist keskonda saab kontrollida pisarakile suurendamise või vähendamise; st läätse ja sarvesta vahelise liideseruimi suurendamine või vähendamine. Läätsede märkimisväärne liikumine vastu sarvesta võib suurendada valu ja kahjustada veelgi juba kahjustunud eptileel. Sõltuvalt patsiendi olukorrast peaks soovitud sobivus võimaldama ainult piiratud läätse liikumist ja pakuma sobivat liideseruimi.
- Hea pisaravedeliku hulk ja -kvaliteet on pehme läätse kandmise olulised aspektid ning neid tuleks sobivuseelise diagnostilise töö osana kriitiliselt hinnata.
- Ravi eesmärgil kontaktläätsed kandvaid patsiente tuleb ravi ajal hoolikalt jälgida. Patsiente tuleb läätse õige sobivuse osas sageli kontrollida. Paraneva sarvesta geomeetria suhe võib silma ja läätse vahel muutuda.
- Raviks vajalikke ravimeid tuleb kasutada ettevaatusega ja silmaarsti hoolika järevalve all. Lahuste toonus ja pH võivad mõjutada läätse sobivust ja liikumist ning pärast soovitatud libestava lahuse pealekandmist võib olla vajalik läätse eemaldamine.

PAKENDI MÄRGISTUSEL KASUTATAVAD LÜHENDID JA SÜMBOLID	
LÜHEND/SÜMBOL	TÄHENDUS
BC	Baaskumerus
DIA	Diameeter
PWR	Tugevus
D	Diopter (läätsede tugevus)
L	Vasak
R	Parem
VP/DMAEMA	Vinüülpürrolidoon/dimetüülaminoetüülmetakrülaat
	Pakendi jäätmekäitluse litsentsi märk
	Parti nr
	Kasutatud kuni
EXP	Kõlblikkusaeg
	Ühekordne steriilne barjäärisüsteem
	Steriliseeritud auruga
	Euroopa vastavusmärgis
	Kahe-täheline keelekood (Näidisel on inglise keel)
	Hoiatus
	Tutvuge kasutusjuhendi või elektroonilise kasutusjuhendiga
	Mitte kasutada, kui blisterpakend on rikutud ja lugege kasutusjuhendi
	Tootja
	Tootmiskuupeäv
	Meditsiinisead
	Ainulaadne seadme identifikaator
	ARGE VISAKE LAATSESID WC-POTTI EGA KRAANIKAUSSI
	Võitludat esindaja Euroopa Ühenduses/Euroopa Liidus
	Tähelepanu! (Ühendriikide) föderaalseadusega kehtestatud piirangu alusel on seadme müük lubatud vaid litsentseeritud silmaspetsialisti poolt või tellimisel.

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, USA

CE 0123

EC REP

Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands, Belgia

Importija:
CIBA VISION GmbH
Industriering 1
63608 Grosswallstadt
Saksamaa

Alcon

Koostamise kuupäev: 2024-02

900479518-0224

Kontaktläätsede **Kasutusjuhend** on saadaval ka veebisaidil: www.ifu.alcon.com

© 2024 Alcon Inc.

¹ Cutter GR, Chalmers RL, Roseman M. The Clinical Presentation, Prevalence, and Risk Factors of Focal Corneal Infiltrates in Soft Contact Lens Wearers. *The CLAO Journal*. Jan 1996; 22 (1): 30-37.

² Schein OD, Glynn RJ, Poggio EC, Seddon JM, Kenyon KR. The Relative Risk of Ulcerative Keratitis Among Users of Daily-Wear and Extended-Wear Soft Contact Lenses. *N Eng J Med*. 1989; 321(12):773-83.

900479518-0224