

C-Well silmatilgad naatriumhüaluronaadiga

Leevendavad kohe silmade ebamugavustunnet

Niisutavad tilgad hüaluroonhappega

Niisutavad tilgad hüaluroonhappega mis leevendavad silmade ebamugavustunnet, stabiliseerivad pisarakihi ja kaotavad silmade kuivuse.

Näidustused

- Silmi kurnavad tegevused, näiteks arvutiga töötamine või pikaajaline lugemine.
- Kliimaseade töökohas.
- Pikad autosõidud või lennureisid.
- Saastatud või tihe atmosfäär.
- Kontaktläätsede kandmine.

Kasutusjuhend

Tilgutage üks või kaks tilka otse silma. Vajadusel pilgutage mõned korrad silmi, et normaalne nägemine taastuks.

Ettevaatusabinõud

- Ärge puudutage pipetti.
- Hoidke pudelit tihedalt suletuna.
- Enne toote esmakordset kasutamist veenduge, et pakendi turvasulgur ei ole vigastatud. Pärast pudeli avamist tuleb toode kahe kuu jooksul ära kasutada.
- Hoidke pudelit lastele kättesaamatus kohas.
- Püsiva ärrituse korral lõpetage toote kasutamine ja pöörduge silmaarsti poole.
- Säilitage temperatuuril 5 °C kuni 30 °C. Ärge jätke toodet pikemaks ajaks valguse kätte.

Vastunäidustused

Ärge kasutage toodet, kui olete selle koostisosade suhtes allergiline.

KOOSTIS

Naatriumhüaluronaat, hüdroksüetüülselluloos, naatriumkloriid, boorhape, naatriumtetraboraat, dinaatriumedetaat 0,02% ja polüheksaniid 0,0001% puhastatud vees.