

PALUN LUGEGE HOOLIKALT JA SÄILITAGE PAKENDI INFOLEHT EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS, JUHUL, KUI TEIL TEKKIB PROBLEEM.

BAUSCH + LOMB RENU MULTI-PUROPSE SOLUTION FOR SENSITIVE EYES – ReNu universaalne läätsehoolduslahus tundlikele silmadele

JUHISED: DESINFITSEERIMISEKS JA PUHASTAMISEKS TULEB JÄRGIDA JÄRGMISEID TEGEVUSI.

1. Tilgutage kontaktlääts mõlemale küljele vähemalt 3 tilka Renu sensitive universaalset lahust ja hõõruge 20 sekundit. Eraldi igapäevast puhastusvahendit pole vaja.
2. Eemaldage lääts pinnalt mustus, loputades seda põhjalikult Renu sensitive universaalse lahusega.
3. Asetage puhastatud kontaktläätsed läätskarpi ja täitke värske Renu sensitive universaalse lahusega.

Leotage vähemalt neli tundi. Pidage meeles, et kasutage alati värsket lahust. Ärge kunagi kasutage lahust uuesti.

Teie läätsed on nüüd kandmiseks valmis. Soolalahusega loputamine pole vajalik. Kui kontaktläätsedele jääb mustust, loputage neid enne sisestamist Renu sensitive universaalse lahusega. SÄILITAMINE: Võite hoida oma läätsesid avamata läätskarbis kuni kandmiseni, maksimaalselt 30 päeva.

VALGU EEMALDAMISEKS KONTAKTLÄÄTSEDELT:

Renu sensitive ja ReNu® 1 Step™ igapäevase valguemaldaja vedeliku spetsiaalne kombinatsioon on lihtne ja mugav viis valgujääkide tõhusaks eemaldamiseks pehmetelt kontaktläätsedelt iga päev. ReNu® 1 Step™ igapäevane valguemaldaja vedelik on spetsiaalselt loodud igapäevaseks kasutamiseks, et samaaegselt ensümaatilisel puhastada ja desinfitseerida teie läätsi iga kord, kui leotate neid Renu Sensitive lahuses.

Järgige ensümaatilise tootega kaasasolevaid juhiseid ja kasutage vastavalt oma silmaarsti juhiste.

Märkus. Nõuetekohane läätsehooldus nõuab valgujääkide eemaldamist läätsedelt.

SISU: Steriilne isotooniline lahus, mis sisaldab boorhapet, dinaatriumedetaati, poloksamiini, naatriumboraati ja naatriumkloriidi; säilitusaineks DYMED® (polüaminopropüülbiguaniid) 0,00005%.

TOIME: Puhastab, vabastab ja eemaldab pehmetelt kontaktläätsedelt biokile, sette ja mustuse. Hävitab lääts pinnal olevad kahjulikud mikroorganismid. Loputab, hoiustab ja niisutab läätsi enne sisestamist. Kasutamiseks koos ReNu® 1 Step™ igapäevase valguemaldusvedelikuga.

NÄIDUSTUSED (kasutusala): BAUSCH + LOMB renu sensitive mitmeotstarbeline lahus on näidustatud igapäevaseks puhastamiseks, valgu eemaldamiseks koos ReNu® 1 Step™ igapäevase valguemaldusvedelikuga, igapäevaseks ja pikaajaliseks pehmete kontaktläätsede loputamiseks ja hoiustamiseks ning keemiliseks (mitte kuumuse) desinfitseerimiseks vastavalt silmaarsti soovitudele.

VASTUNÄIDUSTUSED (mittekasutamise põhjused): Kui olete allergiline mõne selle toote koostisosa suhtes, ärge seda kasutage.

HOIATUSED: KONTAKTLÄÄTSEDE JA LÄÄTSEHOOLDUSVAHENDITEGA SEOTUD PROBLEEMID VÕIVAD PÕHJUSTADA TÕSISEID SILMAVIGASTUSI. On oluline, et järgiksite oma silmaarsti juhiseid ja kõiki etiketil

olevaid juhiseid kontaktläätsede ja läätsehooldusvahendite, sh läätsesümbrise, nõuetekohaseks kasutamiseks ja hooldamiseks. Silmaprobleemid, sh sarvkesta haavandid, võivad kiiresti areneda ja põhjustada nägemise kaotust. Päevased läätsed ei ole ette nähtud öiseks kandmiseks ja neid ei tohiks kanda magamise ajal. Kliinilised uuringud on näidanud, et tõsiste kõrvaltoimete risk suureneb, kui neid läätsi kantakse öösel. Pikaajalise kandmise läätsed tuleks regulaarselt eemaldada puhastamiseks ja desinfitseerimiseks või utiliseerimiseks ja asendamiseks vastavalt silmaarsti määratud ajakavale. Kliinilised uuringud on näidanud, et pikaajalise kandmise kontaktläätsede kasutajatel on tõsiste kõrvaltoimete esinemissagedus suurem kui igapäevase kandmise kontaktläätsede kasutajatel. Uuringud on ka näidanud, et tõsiste kõrvaltoimete risk suureneb, mida kauem pikaajalise kandmise läätsi enne puhastamist ja desinfitseerimist või utiliseerimist ja asendamist kantakse. Uuringud on ka näidanud, et suitsetajatel on kõrvaltoimete esinemissagedus suurem. Kui teil tekib silmade ebamugavustunne, liigne pisaravool, nägemise muutused või silma punetus, eemaldage kohe läätsed ja võtke viivitamatult ühendust oma silmaarstiga. Kontaktläätsede kandjatel on soovitatav külastada silmaarsti kaks korda aastas või sagedamini, kui on ette nähtud.

- Saastumise vältimiseks ärge puudutage konteineri otsaga ühtegi pinda. Pärast kasutamist pange kork tagasi.
- Ei ole mõeldud kasutamiseks kuumuse (termilise) desinfitseerimise korral.

Läätsekarp tuleks iga kord, kui läätsesid hoiustate, täita värske lahusega ja mitte kunagi lahust „täiendada“ ega uuesti kasutada. Lahus tuleks kohe pärast läätsede karpi eemaldamist ära visata. Ärge jätke läätsekarpi puutumata ega hoidke seda vees, näiteks kraanivees, pudelis või destilleeritud vees, ega ka mittesteriilse lahusega.

Tühjendage, puhastage ja loputage läätsekarp Renu Sensitive universaalse lahusega. Laske läätsekarpil iga kord, kui läätsed eemaldate, õhu käes kuivada. Liigse lahuse nõrgumiseks võite läätsekarbi õhu käes kuivamise ajal ümber pöörata. Vahetage läätsekarpi iga kuu.

Kui te pärast iga kasutamist läätsekarbist lahust ei valata või kui läätsede eest ei hooldata veega, võib see põhjustada saastumist, mis võib põhjustada silmavigastusi ja nägemise kaotust. Lisateavet oluliste ohutusjuhiste kohta leiate kaasasolevatest juhistest.